

Catéter epicutáneo cava



www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
N° FM 664794
ISO 13485

12/09/23 Rev.00



CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA


Cód. 540



ACCESOS VASCULARES



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

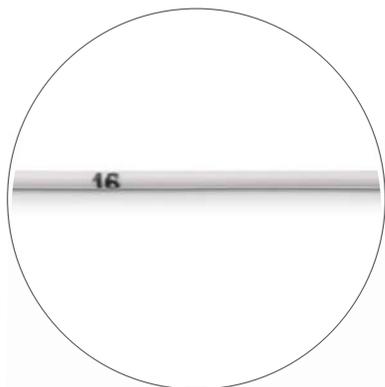

Numerado cada cm para verificar el posicionamiento correcto.

Catéter
100%
Silicona




Clamp de cierre



Conector seguro y efectivo.

- En el extremo del prolongador tiene un racor de conexión que permite la sujeción o la separación del catéter radiopaco de forma sencilla, facilitando retirar el introductor butterfly.
- Larga permanencia, máxima visualización con rayos X.

Esquema de colocación

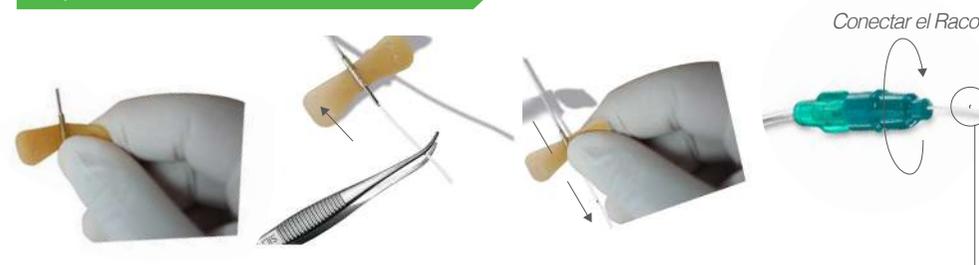

- Quitar el introductor de manera recta para evitar que la punta o el bisel dañen o perforen al catéter.
- El catéter posee una marcación la cual debe coincidir con el extremo del racor para asegurar la correcta colocación.

Kit



Catéter 100% silicona,



Cinta métrica descartable



Introductor tipo Butterfly.

Catéter Epicutáneo Cava prematuros - FR 1,8				Catéter Epicutáneo Cava - FR 2,0			
Ø Interior x Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)	* Flujo (ml/min)	Código	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)	* Flujo (ml/min)	Código
0,28 X 0,57	15,00	3,65	541-15	0,30 X 0,60	15,00	5,75	540-15
0,28 X 0,57	30,00	1,85	541-30	0,30 X 0,60	30,00	3,20	540-30

* Medición realizada a 1 bar de presión.