

NeoSeal[®]

SELLO DE CÁNULAS NASALES



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñado para mejorar el sello y obtener un soporte respiratorio más eficaz
- Protege la piel del tabique y las narinas
- Compatible con la mayoría de cánulas nasales
- No fabricado con látex de caucho natural o DEHP plastificante

Número	Tamaño	Cant./Unidad
N420	Micro	150/caja
N421	Pequeño	150/caja
N422	Grande	150/caja



Patente Pendiente



NeoSeal®

SELLO DE CÁNULAS NASALES

INDICACIONES DE USO

The NeoSeal is intended to create a seal around the nares and protect the skin of the septum and nares. It is intended for use on pediatric (neonates, infants and children) patients.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Retire NeoSeal del recubrimiento.
- 2 Deslice sobre las cánulas nasales con el adhesivo mirando hacia la cánula.
Nota: el lado suave y uniforme sin adhesivo debe estar en contacto con la piel del paciente
- 3 Coloque la cánula conforme al protocolo hospitalario.
- 4 Sustituya NeoSeal a diario o según el protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.

Nota: sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a un médico o según sus indicaciones.

Peligro de asfixia. NeoSeal solo se debe utilizar en pacientes bajo la supervisión continua y directa de profesionales sanitarios formados.

Sustituya de inmediato si está sucio o húmedo.

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la piel.

Solo para usar en un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU

M655 Rev A